

## STANDART OPERASIONAL PEMAKAIAN

**Nama Alat : Suction Pump**

**Merk : YX- 930D**

1. Pastikan tutup botol sudah tertutup dengan rapat
2. Sambungkan selang pada bagian arah pelampung yang berada di botol tersambung dengan saluran input pada mesin
3. Sambungkan penyambung selang antara botol 1 dan botol lainnya
4. Sambungkan selang patient pada botol kedua dengan memasang nasal suction pada ujung selang yang disesuaikan dengan penggunaannya.
5. Pastikan apabila ingin menggunakan foot switch dengan menghubungkan foot switch pada connectornya yang berada di bawah mesin.
6. Hidupkan saklar on/off yang diikuti indicator power menyala.
7. Untuk menggunakan foot switch, saklar on/off di matikan. Tekan menggunakan kaki foot swicth sehingga mesin bisa menyala.
8. Pastikan pada saat proses suction, cairan tidak melebihi batas ukuran botol untuk menghindari induksi cairan yang terhisap ke mesin, karena bisa mengakibatkan endapan pada oli yang mengakibatkan macetnya rotor pompa mesin.
9. Perhatikan kekentalan oli yang berada dibawah dengan melihat pada samping bodi bawah mesin.
10. Tambahkan oli bila terasa berkurang dari batas level oli dengan membuka bagian depan penampung oli, masukan oli menggunakan Spet atau suntikan ber CC besar dengan melepaskan jarumnya.